


# Überblick LC-Display

Das Z1-Display informiert Sie über die Geräteeinstellung. Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über die mittels des integrierten LC-Displays verfügbaren Informationen. Nähere Angaben enthält die Gebrauchsanweisung des Z1.

1. Anzeige des Therapiedrucks
2. Anzeige des Rampenfortschritts (bei eingestellter Rampe)
3. Verbleibende Rampenzeit (bei eingestellter Rampe)
4. Ladezustand der Batterie (falls vorhanden)
5. Anzeige der AC-Stromversorgung (falls angeschlossen)
6. Allgemeine Statusanzeige
7. Störungsanzeige (bei einer Störung)
8. Erinnerungsanzeige (bei übermäßiger Leckage)

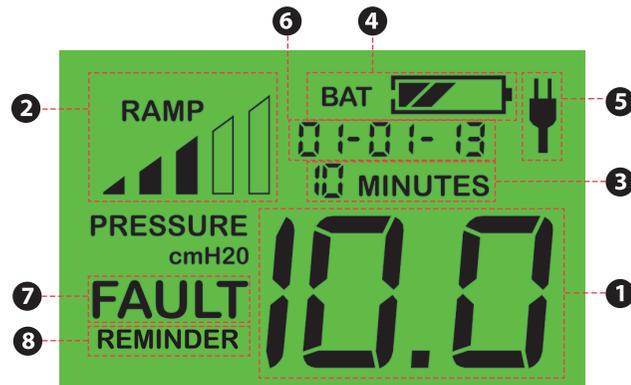

Bei Problemen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung des Z1 zurate oder wenden Sie sich an Breas oder Ihren Gesundheitsdienstleister.

Um Ihr Gerät zu registrieren, füllen Sie bitte das beigefügte Registrierungsformular aus und senden es an uns zurück.



Z1™ ist ein Warenzeichen von Human Design Medical, LLC.  
Zum Patent angemeldet. © Copyright 2013, Breas Medical AB. Alle Rechte vorbehalten.

# BREAS

CE 0123



Z1 Erste Schritte  
Dok. HD40-0005-04 De L-2

## Z1™ Erste Schritte



# Z1™

# Willkommen!


Z1™

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des kleinsten, leichtesten und tragbarsten CPAP-Geräts der Welt! Ihr neues Z1 ist fast einsatzbereit. Um Ihr Z1 in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie nachstehend beschrieben vor. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Z1 vollständig durch.


**1.** Packen Sie den Filter aus. Setzen Sie den Filter in die Endkappe ein (siehe Abbildung), sodass die gerundete Seite des Filters in die Endkappe passt. Der Filter muss alle Öffnungen in der Endkappe bedecken. Drücken Sie die Endkappe auf das Z1.



**2.** Schließen Sie das eine Ende des CPAP-Schlauchs am runden Ende des Schlauchadapters an. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchadapters mit dem Anschluss des Z1 (siehe Abbildung). Schließen Sie das andere Ende des CPAP-Schlauchs an der Maske an. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse dicht sind und keine Luft austreten kann.

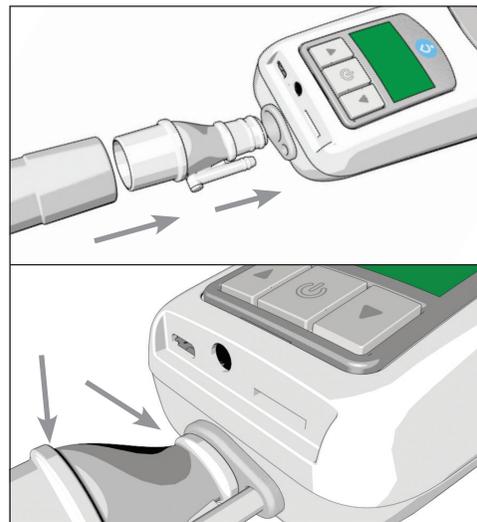

**3.** Schließen Sie die Stromversorgung (AC/DC-Adapter) wie abgebildet am Z1 und an einer Steckdose an. Das Z1 schaltet sich im Standby-Modus ein, und das Display zeigt 0.0 an. Das Z1-Display ist immer aktiv, sobald das Gerät mit Spannung versorgt wird.

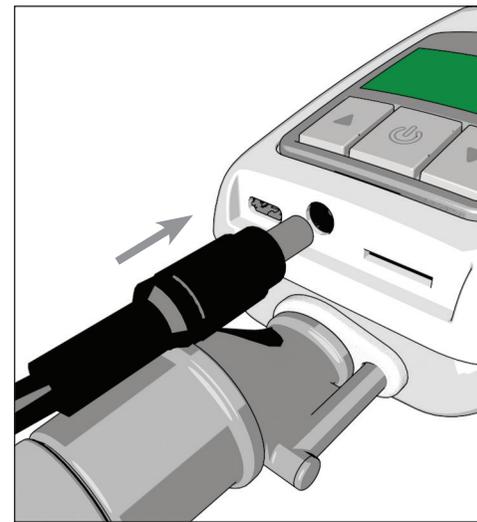

**4.** Programmieren Sie den verordneten Therapiedruck gemäß den Hinweisen in der Gebrauchsanweisung. Betätigen Sie die Start/Stopp-Taste (⏻), um mit der Therapie zu beginnen. Wenn Sie die Taste erneut drücken, stoppen Sie die Therapie.



**WICHTIG:** Das Z1 zeigt „REMINDER“ an, wenn eine Luftleckage zwischen dem Z1-Auslass und der Maske erkannt wird. Die Anzeige erscheint ebenfalls, wenn die Maske nicht ordnungsgemäß getragen wird. Diese Statusanzeige sollte wieder erlöschen, wenn alle Anschlüsse sicher sind, die Maske ordnungsgemäß aufgesetzt und die Therapie gestartet wurde.

**HINWEIS:** Rampenzeit und anfänglicher Rampendruck können eingestellt werden, wenn sich das Z1 im Standby-Modus befindet (Anzeige 0.0). Zum Einstellen der Rampenzeit den AUFWÄRTSPFEIL (▲) gedrückt halten, bis die Rampenzeit blinkt. Zum Einstellen des anfänglichen Rampendrucks den ABWÄRTSPFEIL (▼) gedrückt halten, bis die Druckanzeige blinkt. Drücken Sie den AUF- oder ABWÄRTSPFEIL wiederholt, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. (Stellen Sie die Rampenzeit auf „00“, um die Rampenfunktion zu deaktivieren.) Betätigen Sie die START/STOPP-TASTE (⏻) und halten Sie sie gedrückt, um die neuen Einstellungen zu speichern. Nähere Informationen zur Anpassung der Einstellungen enthält die Gebrauchsanweisung des Z1.