

Gel-Komfort für besseren Schlaf

Philips Respironics Amara Gel – Mund-Nasen-Maske

Anleitung zur Anpassung der Maske



- 1** Trennen Sie vor dem Anlegen der Maske die Clips des Kopfbandes, indem Sie sie aus dem Rahmen drehen.

Hinweis: Vor dem Anlegen Hände und Gesicht waschen. Keine Feuchtigkeitscremes oder Lotionen verwenden.



- 2** Setzen Sie die Maske bei leicht geöffnetem Mund komfortabel auf Ihr Gesicht. Ziehen Sie dann das Kopfband über Ihren Kopf.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie das Kopfband lösen und eine größere Einstellung wählen.



- 3** Halten Sie die Maske in Position und verbinden Sie die Clips wieder, indem Sie sie zurück auf den Maskenrahmen drücken.

Hinweis: Das Kopfband sollte flach auf Ihrem Hinterkopf aufliegen.



- 4** Die Schiebeeinstellung an der Stirn vollständig ausfahren, indem Sie den Knopf gedrückt halten und den Rahmen vom Gesicht schieben.

Hinweis: Sie sollten auf dem Nasenrücken nur einen minimalen Druck spüren.



- 5** Beginnend mit den unteren Riemen die Laschen des Kopfbandes gleichmäßig zurückziehen, bis eine bequeme Passform erreicht ist.

Hinweis: Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an. Das Stirnpolster soll die Stirn leicht berühren.



- 6** Die endgültigen Anpassungen für den Tragekomfort und die Abdichtung sollten im Liegen und unter Atemdruckerhöhung erfolgen.

Hinweis: Bestehen übermäßige Luftleckagen, eine andere Polstergröße verwenden.

Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske. Ein größerer Maskenrahmen ist ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf www.philips.de/amara

BroudyTK 7/21/14 MCI 4106294 PN 1117961

PHILIPS
RESPIRONICS