

**PHILIPS**

DreamWear

# Anpassanleitung DreamWear Masken



DreamWear Nasenmaske




DreamWear Gelkissen



DreamWear Full Face

# DreamWear – Anleitung zur Anpassung der Masken

Um die Größe des Maskenkissens zu bestimmen, wird die mitgelieferte Anpassschablone waagrecht unter die Nase gehalten. Die passende Maskenkissengröße entspricht den Kontaktstellen zwischen Anpassschablone und dem äußeren Rand der Nasenflügel bzw. der Nasenspitze. Die Maskenkissenöffnung sollte direkt unter den Nasenlöchern liegen. Bei der Full Face sollte das Maskenkissen Mund und Nase bedecken. Das Maskenkissen sollte so anliegen, dass möglichst wenig Luft entweichen kann.

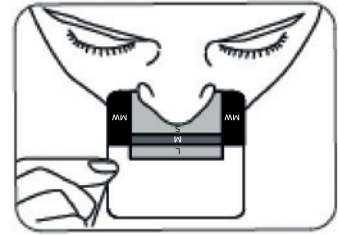

1

Bei der Full Face und Nasenmaske darf die Nase sich nicht innerhalb der Maskenkissenöffnung befinden. Wenn Teile des Maskenkissens über die Nase hinausgehen, wird das Maskenkissen falsch getragen. Es kann eine andere Kissengröße erforderlich sein. Für die Anpassung der Gelkissen führen Sie die Spitzen des Kissens in die Nasenlöcher ein. Wählen Sie das Kissen so aus, dass die blauen Gelböden des Kissens bequem und ohne Zwischenräume unter der Nase sitzen und nicht in die Nasenlöcher gedrückt werden.

2

Maskenrahmen, Kopfband und Kissen werden zusammengesetzt und das Maskenkissen unter der Nase platziert. Positionieren Sie den Rahmen oben auf dem Kopf und ziehen Sie das Kopfband über den Hinterkopf.

3

Bei der Full Face bringen Sie zuerst die magnetischen Kopfbandclips am Maskenkissen an. Um den Sitz der Maske zu justieren, werden zunächst die Laschen des Kopfbandes von den Stoffteilen abgezogen. Dann sollte die Länge der Bänder angepasst werden. Zur Befestigung sind die Laschen wieder an den Stoff anzudrücken.

**Hinweis: Ziehen Sie das Kopfband nicht zu fest an.**

4

Verbinden Sie den Schlauch mit dem Anschlussstück der Maske oben auf dem Kopf. Letzte Einstellungen bis zu einem komfortablen Sitz der Maske sollten im Liegen bei eingeschalteten Therapiegerät vorgenommen werden. Nach Abschluss der Maskeneinstellung sollte der abgewinkelte Schlauchanschluss auf der Kopfoberseite mittig aufliegen.

**Hinweis: Weitere Informationen zum Anpassen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**

Video-Anleitungen finden Sie unter:

[www.philips.de/dreamwear-fullface/videos](http://www.philips.de/dreamwear-fullface/videos)

[www.philips.de/dreamwear-gelkissen/videos](http://www.philips.de/dreamwear-gelkissen/videos)

[www.philips.de/dreamwear-nasenmaske/videos](http://www.philips.de/dreamwear-nasenmaske/videos)



DreamWear  
**Nasenmaske**



DreamWear  
**Gelkissen**



DreamWear  
**Full Face**



# Einfach die richtige Passform finden

## Mittlere Rahmengröße

Den meisten Trägern passt die mittlere Maskenrahmengröße (MED). Sollte diese Größe nicht zufriedenstellend sitzen, sollte der kleinere oder größere Maskenrahmen gewählt werden.



Richtige Passform

## Große Rahmengröße



Maske zu klein



Richtige Passform

## Kleine Rahmengröße



Maske zu groß



Richtige Passform



## Maskenkissen tauschen und reinigen

Zum Austausch des Maskenkissens drücken Sie das Kissen am Anschluss zum Rahmen mit Zeigefinger und Daumen vorne und hinten zusammen und ziehen Sie gleichzeitig Rahmen und Kissen auseinander. Waschen Sie die Einzelteile der Maske täglich mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel und lassen Sie sie an der Luft trocknen.



## Magnetische Clips bei DreamWear Full Face

Die Kopfbandclips und das Maskenpolster der DreamWear Full Face enthalten Magnete, um das Kopfband einfach am Kissen vorne befestigen zu können.

**Hinweis:** Einige medizinischen Geräte können durch Magnetfelder beeinträchtigt werden. Für Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Cochleaimplantaten ist daher besondere Vorsicht geboten. Bitte beachten Sie die gesonderten Anwendungshinweise in der Gebrauchsanweisung.